

## PRÉVENIR, SOULAGER, GUÉRIR LE MAL DE DOS

**Bon nombre de patients arrivent ou arriveront dans votre cabinet parce qu'ils ont mal au dos. Ce "mal du siècle" touche environ 80% des français et représente la deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste. Prévenir, soulager, guérir, les technologies CELLU M6® ALLIANCE et HUBER® 360 sont devenues des références pour une prise en charge globale.**

### MOBILISER ET SOULAGER AVEC CELLU M6® ALLIANCE




Dès quelques minutes de traitement, la technologie CELLU M6® ALLIANCE aide à relâcher les contractures musculaires et à libérer les mobilités articulaires tout en favorisant les suites de la rééducation.

Lombalgie, sciatique, hernie, ... quelle que soit la pathologie, **la mobilisation articulaire est souvent douloureuse pour le patient et délicate pour le kinésithérapeute.** Les tissus sont indurés, ce qui rend le massage manuel difficile. Soucieuse d'apporter toujours plus de confort dans le quotidien des masseurs-kinésithérapeutes, **LPG® SYSTEMS a lancé cette année sa 10<sup>ème</sup> génération de CELLU M6® : CELLU M6® ALLIANCE.** Véritable révolution technologique, l'appareil offre de nouvelles possibilités pour traiter précocement le mal de dos. La tête de traitement Alliance 50 s'est équipée d'un **rouleau et d'un clapet motorisés** pour une mobilisation tangentielle des tissus.

Cette nouvelle stimulation mécanique, plus intense et plus douce à la fois, apporte un véritable effet relaxant pour le patient tout en soulageant le kinésithérapeute. A l'aide de multiples réglages personnalisables, la tête de traitement **assouplit** les plans de glissement cutanés et sous cutanés, **défibrose**, **lève** les adhérences pour une nette amélioration de la mobilité et de la trophicité tissulaire. En parallèle, l'ajout d'une aspiration séquentielle permet au praticien d'obtenir une action antalgique immédiate.

### RENFORCER ET RÉÉQUILIBRER AVEC HUBER® 360

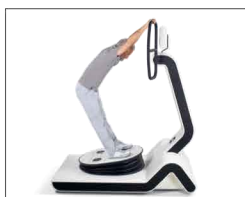

Des protocoles spécifiques favorisent le renforcement des muscles posturaux et de la ceinture abdominale pour un meilleur gainage et donc un meilleur équilibre sagittal.

En complément des séances de CELLU M6®, **HUBER® 360 aide à remettre progressivement le corps en mouvement.** Dans un premier temps, le kinésithérapeute réalise un bilan fonctionnel complet de son patient afin de déceler les restrictions de mobilité dues aux douleurs et évaluer ses capacités physiques. Ensuite, le patient débute les exercices sur la **plateforme motorisée**, directement en position debout. Grâce aux **différentes trajectoires du plateau et aux capteurs de force intégrés**, HUBER® 360 sollicite de manière infra-douloureuse **l'ensemble des chaînes articulaires et musculaires** tout en agissant sur la proprioception.

Consultez les études scientifiques sur [www.lpgmedical.com](http://www.lpgmedical.com)

L'ajout d'un **correcteur dynamique de posture** permet au kinésithérapeute de s'assurer du bon positionnement de son patient (gestion du centre de gravité) afin de mieux solliciter la zone à travailler. En parallèle, des exercices d'étirement aident à récupérer de la souplesse sur la zone lésée et à libérer les raideurs. Grâce au bilan chiffré, le patient peut prendre conscience de ses limites et suivre sa progression séance après séance. Il devient ainsi acteur de sa propre rééducation.

- Plus de 90% des utilisateurs sont satisfaits des résultats obtenus.
- 90% des utilisateurs relèvent la prise en main facile.
- Près de 80% des utilisateurs recommandent de s'équiper du HUBER® 360
- 91% des clients équipés l'utilisent pour les pathologies du dos.

Plus d'informations au 04 75 78 68 58  
ou [serviceclient@lpgsystems.com](mailto:serviceclient@lpgsystems.com)  
**lpgmedical.com**

**LPG**  
medical